

# DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

NeoTouch® 25-101

|  | Chemické činidlo              | Breakthrough Time | Index ochrany | Číslo CAS | Jednostka Notifikována | EN standard |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|-------------|
|  | Aceton                        | 0.2               | 0             | 67-64-1   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Akrylamid, 40%                | > 480             | 6             | 79-06-1   | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Anioxyde™ 1000                | > 480             | 6             |           | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Cefuroxim sodíková sůl 15 g/l | > 480             | 6             |           | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Cidex™                        | > 480             | 6             | 111-30-8  | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Cidex™ OPA                    | > 480             | 6             | 643-79-8  | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Cyklohexan                    | < 5               | 0             | 110-82-7  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Dietyléter                    | 0.2               | 0             | 60-29-7   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Dimetylacetamid               | 4.8               | 0             | 127-19-5  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Dimetylformamid               | 2                 | 0             | 68-12-2   | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Etylacetát                    | 1                 | 0             | 141-78-6  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Etylalkohol, 70%              | 14                | 1             | 64-17-5   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Etylalkohol, 96%              | 6                 | 0             | 64-17-5   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Formaldehyd, 35%              | > 480             | 6             | 50-00-0   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Formaldehyd, 4%               | > 480             | 6             | 50-00-0   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Heptan                        | < 5               | 0             | 142-82-5  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Hexan                         | < 5               | 0             | 110-54-3  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Hydroxid amonný, 25%          | 9                 | 0             |           | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Hydroxid sodný, 50%           | > 480             | 6             | 1310-73-2 | Centexbel              | 374-3:2003  |

| DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)  |                        |       |                 |         |                |       |
|---|------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------|
| 0   | 1                      | 2     | 3               | 4       | 5              | 6     |
| < 10  | 10-30                  | 30-60 | 60-120          | 120-240 | 240-480        | > 480 |
| Nedoporučeny  | Ochrana proti postřiku |       | Střední ochrana |         | Vysoká ochrana |       |
| <p>Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.</p> |                        |       |                 |         |                |       |

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)



# DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

NeoTouch® 25-101

|  | Chemické činidlo             | Breakthrough Time | Index ochrany | Číslo CAS | Jednostka Notifikována | EN standard |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|-------------|
|  | Isopropanol                  | 70                | 3             | 67-63-0   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Kyanid metylatý              | < 5               | 0             | 75-05-8   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Kyselina chlorovodíková, 37% | 101               | 3             | 7647-01-0 | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Kyselina dusičná, 70%        | 29                | 1             | 7697-37-2 | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Kyselina octová, glaciální   | 17                | 1             | 64-19-7   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Kyselina sírová, 98%         | 7                 | 0             | 7664-93-9 | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Kyselina fluorovodíková, 10% | >480              | 6             | 7664-39-3 | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Kyselina fluorovodíková, 48% | 29                | 1             | 7664-39-3 | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Methanol                     | 9                 | 0             | 67-56-1   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Metyl etyl keton             | 0.2               | 0             | 78-93-3   | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Methylmetakrylát             | 0.5               | 0             | 80-62-6   | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Perchloretylen               | < 5               | 0             | 127-18-4  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Peroxid vodíku, 30%          | > 480             | 6             | 7722-84-1 | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Pyridin                      | 0.3               | 0             | 110-86-1  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Roztok metronidazolu 5 g/l   | > 480             | 6             | 443-48-1  | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Sulfoxid metylatý            | 10                | 1             | 67-68-5   | Force Technology       | 374-3:2003  |
|  | Tetrahydrofuran              | 0.2               | 0             | 109-99-9  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Toluen                       | 0.3               | 0             | 108-88-3  | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | Triethylamin                 | < 5               | 0             | 121-44-8  | Centexbel              | 374-3:2003  |

| DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)  |                               |       |                        |         |                       |       |
|---|-------------------------------|-------|------------------------|---------|-----------------------|-------|
| 0   | 1                             | 2     | 3                      | 4       | 5                     | 6     |
| < 10  | 10-30                         | 30-60 | 60-120                 | 120-240 | 240-480               | > 480 |
| <b>Nedoporučeny</b>   | <b>Ochrana proti postříku</b> |       | <b>Střední ochrana</b> |         | <b>Vysoká ochrana</b> |       |
| <p>Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.</p> |                               |       |                        |         |                       |       |

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)



## DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

NeoTouch® 25-101

|  | Chemické činidlo | Breakthrough Time | Index ochrany | Číslo CAS | Jednostka Notifikována | EN standard |
|--|------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|-------------|
|  | Xylen            | < 5               | 0             | 1330-20-7 | Centexbel              | 374-3:2003  |
|  | o-Toluidin       | 3                 | 0             | 95-53-4   | Force Technology       | 374-3:2003  |

### DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

| 0            | 1                      | 2     | 3               | 4       | 5              | 6     |
|--------------|------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------|
| < 10         | 10-30                  | 30-60 | 60-120          | 120-240 | 240-480        | > 480 |
| Nedoporučeny | Ochrana proti postřiku |       | Střední ochrana |         | Vysoká ochrana |       |

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

